

Rince-œil

Pour le rinçage des yeux et du corps



Réf. RIOE01

Les points forts

- Facile et rapide d'utilisation
- Solution spéciale pour le rinçage de poussières ou produits dangereux
- Neutralisation rapide des produits chimiques, acides et bases
- A utiliser pour le nettoyage du corps en cas de brûlures chimiques ou thermiques
- Permet de nettoyer les souillures accidentelles lors de la préparation des traitements
- Permet de respecter le code du travail

Caractéristiques techniques

- Flacon stérile, à usage unique, prêt à l'emploi
- Effets détoxiquant et hypertonique : empêche la pénétration des molécules toxiques
- Temps de rinçage recommandé : 2 minutes
- Norme 93/42/CEE
- Conservation optimale entre 5 et 35°C
- Composition :
 - Eau (> 80%)
 - Disodium phosphate (1 - 5%)
 - Potassium phosphate (< 1%)
- > Évacue les molécules toxiques par rinçage
- > Contenance : 200 mL

Le rinçage neutralisant en quelques étapes simples:

- Tourner l'ocillière jusqu'à perforation de l'opercule
- Appliquer sur l'œil, tête en avant ou en arrière, pressez le flacon
- Rincer les parties atteintes jusqu'à vider le flacon

